

ПОЛНОРОСТОВОЙ МАНЕКЕН СЛР Т11 В/Р МАКСИМ II-01 ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА С КОНТРОЛЛЕРОМ

Артикул: K0007659



Габариты:

Длина: 170 см
Высота: 25 см
Ширина: 55 см
Вес: 14 кг

Описание:

Особенностью манекен-тренажера Максим Т11 II-01 В/Р является индикатор, позволяющий контролировать правильность обеспечения медицинской помощи. Данное устройство используется для демонстрации, обучения и проверки навыков оказания первой помощи. Показатели, фиксируемые контроллером

- правильность положения головы
- достаточность вдуваемого воздуха
- усилие компрессии

Так, манекен Максим II-01 может **работать в имитации как взрослого человека, так и ребенка**, позволяя отрабатывать различные методы оказания сердечно-легочной реанимации. Кроме того, манекен способен **имитировать пульс** в случае удачно проведенной СЛР.

С тренажером Максим II-01 для освоения навыков сердечно-легочной реанимации Вы сможете **практиковаться в наработке навыка непрямого массажа сердца, ИВЛ (вентиляция легких) рот-рот/рот-нос, а также в наложении повязок и шин.**

Конечности, шея и челюсть манекена подвижны, что делает его мобильным и многофункциональным: так, с его помощью можно даже отработать навык транспортировки пострадавшего.

Работает манекен **в 3-х различных режимах**.

Режимы работы тренажера

- **Реанимация одним спасателем (2:15)**
Отрабатывание навыков с применением сценария, включающего 2 вдоха и 15 толчков грудной клетки за минуту по принципу не менее 5-ти циклов
- **Реанимация двумя спасателями (1:5)**
В течение минуты нужно выполнить 10 циклов, вдох и 5 поочередных толчков по груди
- **Режим (2:30)**
Если невозможно определить время наступления клинической смерти, рекомендуется использовать режим, предусматривающий 2 вдоха и 30 толчков грудины в течение минуты в 2 подобных цикла. Такой режим одобрен Европейским междисциплинарным советом по реанимационной медицине.

Максим II-01 В/Р не может быть использован для реанимации человека прекардиальным ударом. Этот метод лечения вправе использовать только медицинский персонал.

Работает от сети 220В. Легко собирается в полноростовой манекен с помощью гаек, поставляемых совместно с тренажером (все конечности имеют соответствующие отверстия).



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/modeli/maksim/18615/

Ссылка на страницу раздела:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/